

Інформація про виріб Стетоскоpii

Шановні Клієнти, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю. Справжній виріб фірми KaWe відповідає визначенням директиви EG 93/42/ EWG (директива по медичних приладах).

Перед використанням слід повністю і уважно прочитати інформацію про из- делии і дотримуватися вказівок по відходу!

Перед використанням уважно ознайомтеся з інформацією про виріб.

Застосування: Використати стетоскоп дозволяється тільки спеціально навченому і допущеному персоналу. Складові частини стетоскопа : вушні дужки, система трубок і голівка. Залежно від специфіки обстеження стетоскоп, при мінімальному натисканні, прикладається до досліджуваної частини тіла. Стетоскопи з подвійною голівкою, шляхом перемикаання, дають можливість вибрати режим роботи з воронкою або мембраною.

Призначення: Стетоскоп це діагностичний інструмент для аускультатії (вислухування). **Обслуговування:** Основним принципом роботи стетоскопа є вислухування звукових феноменів внутрішніх органів. Для оптимальної звукопровідності необхідно забезпечити щільний контакт з шкірним покривом. При використанні стетоскопа з вушними дужками встановите трубки вушних дужок так, щоб вушна олива була спрямована трохи вперед - до носа - забезпечивши таким чином зручну посадку, що відповідає анатомії слухових проходів. Прикладіть мембрану або відповідно воронку до досліджуваної частини тіла. Наступні моделі стетоскопів мають подвійну функцію, можна перемикати мембрану на воронку: Planet, Prestige, Prestige Light, Profi Kardiologie, Kirchner Colorscop Duo, Double, Rapport і учбовий стетоскоп для медсестер Duo. За допомогою повороту голівки стетоскопа можна вибрати меж- ду воронкою і мембраною. Залежно від вибору один повітряний простір (повітряний стовп) закритий, а інший відкритий.

Використання не за призначенням/протипоказання для виробу: Інше або застосування, що виходить за рамки призначення, вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають в наслідок цього наслідку виробник відповідальності не несе. За створення ризикованих ситуацій відповідальність несе виключно Користувач.

Інші вказівки, догляд, зберігання : При відповідному використанні і зберіганні згідно з приписами, стетоскоп надійно служитиме Вам багатьох років.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашої інформації про виріб, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, звернетея до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Застереження: Не поміщати стетоскоп у воду.

Обмеження регенерації : Часта повторна підготовка до експлуатації не має значної дії на інструменти. Зняття продукту з експлуатації відбувається як правило із-за зносу або поломки/ушкодження виробу при використанні.

Вказівки Робоче місце: Забруднення на поверхні видалити одноразовою/паперовою серветкою.

Зберігання і транспорт : Для захисту від забруднення і запилювання зберігайте стетоскоп в упаковці.

Підготовка до очищення: Ніяких особливих вимог.

Ручне очищення: Вушні дужки і трубки можна чистити за допомогою алкоголю або слабого мильного розчину. Вушну оливу необхідно відгвинтити і промити в слабкому мильному розчині. Мембрану можна промити в слабкому мильному розчині, заздалегідь звільнивши її від стопорного кільця.

Автоматичне очищення: Автоматичне чищення неможливе.

Дезинфекція: При застосуванні чистячих і дезинфекційних засобів, таких як Meliseptol®/Meliseptol® rapid зверніть увагу на вказану виробником концентрацію і час дезинфекційної витримки.

Технічне обслуговування: Пошкоджені частини відсортувати і замінити.

Контроль і експлуатаційна перевірка : Перевірте мембрану, трубки і вушні дужки на предмет наявності ушкоджень. Система має бути цілісною. Перед використанням перевірте правильність насадки вушної оливи і настройте індивідуально вушні дужки.

Упаковка: Окремо: можна використати звичайний поліетиленовий пакет. Пакет повинен відповідати розмірам виробу.

Стерилізація: Досить простого очищення, оскільки стетоскоп не призначений для оперативного втручання.

Зберігання: Зберігайте стетоскоп в сухому місці.

Додаткова інформація: Дотримуйтеся інформації про виріб.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу Ви знайдете на нашому сайті:

www.kawemed.de.

Виробник: **KaWe**

Контакт з виробником: Адреса або номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.

Утилізація: Цей виріб дозволяється утилізувати з побутовими відходами.



Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Аламед» Україна, 04080, вул. Межигірська 82а, оф 301 Тел. +(38 044) 361-87-50 E-mail: alamedkiev@i.ua