

Посібник по застосуванню Гоніометр

Шановні клієнти, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю.

Перед використанням слід повністю і уважно прочитати цей посібник по застосуванню і дотримуватися вказівок по відходу!

Перед застосуванням уважно ознайомтеся із способом управління.

Сфера застосування : Гоніометр має право застосовувати тільки спеціально підготовлений персонал. Гоніометр є допоміжним засобом при вимірі амплітуди рухів суглобів верхніх і нижніх кінцівок.

Призначення: Обидві лінійки прикладаються до відповідних ділянок тіла і встановлюються в необхідному положенні. За допомогою градусної шкали визначається кут руху. Зверніть увагу на те, щоб центр обертання гоніометра знаходився по можливості на тій же осі, що і суглоб кінцівки.

Використання не за призначенням/протипоказання: Інше або застосування, що виходить за рамки призначення, вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають в наслідку цього наслідку виробник відповідальності не несе. За створення ризикованих ситуацій відповідає тільки користувач.

Інші вказівки, догляд, зберігання : При відповідному використанні і зберіганні згідно з приписами, гоніометр надійно служитиме Вам багато років. Ніколи не згинайте гоніометр.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашого посібника по застосуванню, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Особливі приписи: Ніяких особливих вимог. Після застосування інструменту, рекомендується відразу ж підготувати його до подальшого використання.

Обмеження при повторному використанні: Часта підготовка виробу до застосування має незначну дію на нього. Термін служби (тривалість експлуатації) продукту залежить зазвичай від зносу і ушкоджень. Після застосування приладу, рекомендується якнайскоріше підготувати його до подальшого використання.

Вказівки Робоче місце: Забруднення на поверхні видаляють одноразовою/паперовою серветкою.

Зберігання і транспортування : Щоб уникнути забруднення і попадання пилу завжди зберігайте гоніометр в упаковці.

Підготовка очищення : Ніяких особливих вимог .

Ручне очищення: Гоніометр можна протирати вологою, м'якою і не ворсистюю тканиною.

Очищення автоматично: Автоматичне очищення не допускається.

Дезинфекція: Для дезинфекції змочіть тканину спиртом і протріть гоніометр.

Обслуговування: Пошкоджені частини відсортувати, при необхідності замінити.

Контроль і експлуатаційна перевірка : Рухливі частини, такі як скріплення лінійки, перевірити на легкість ходу. Шкалу перевіряють на зчитування.

Упаковка: Окремо: можна використати звичайний поліетиленовий пакет. Розмір пакету повинен відповідати розмірам виробу, так щоб пакет закривався вільно.

Стерилізація: Не відноситься до хірургічних інструментів, немає необхідності в стерилізації.

Зберігання: Ніяких особливих вимог .

Додаткові відомості: Ніяких особливих вимог.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу Ви знайдете на нашому сайті: www.kawemed.de.

Контакт: Адреса або номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.