

Посібник по застосуванню Джгут венозний



Шановні клієнти, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю. Справжній виріб фірми KaWe відповідає визначенням директиви EG 93/42/EWG (директива по медичних приладах).


Перед використанням прочитайте ретельно і повністю інструкцію з експлуатації і дотримуйтеся вказівок по догляду.

Перед застосуванням уважно ознайомтеся із способом управління.

Сфера застосування : Джгут венозний має право застосовувати тільки спеціалізований персонал.

Призначення: Венозний джгут є допоміжним пристосуванням призначеним для обмеження циркуляції крові при заборі крові або при проведенні внутрішньовенних ін'єкцій.

Правила користування : Обернути джгут навколо руки і вставити клямку в корпус. Для обмеження циркуляції венозної крові потягнути за вільний кінець джгута, затягуючи джгут. Для послаблення і зняття джгута, натиснути на кнопку (див. мал.).

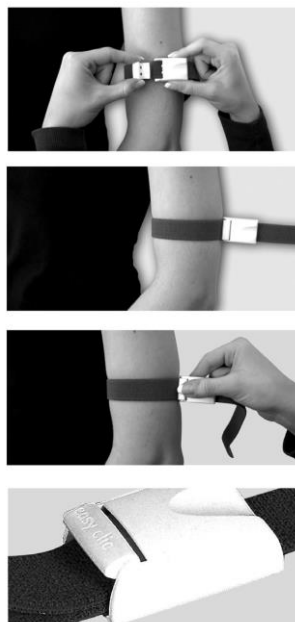

Використання не за призначенням / протипоказання для виробу: Інше або застосування, що виходить за рамки призначення, вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають в наслідку цього наслідку виробник відповідальності не несе. За створення ризикованих ситуацій відповідає тільки користувач.

Очищення: Для відвертання забруднення і попадання пилу зберігайте венозний джгут постійно в упаковці. Джгут можна протирати вологою, м'якою і не ворсистю тканиною. Для дезинфекції венозного джгута тканину можна злегка змочити спиртом.

Інші вказівки, догляд, зберігання : При відповідному використанні і зберіганні згідно з приписами, венозний джгут надійно служитиме Вам багато років.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашого посібника по застосуванню, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Особливі приписи: Ніяких особливих вимог.

Обмеження: Ніяких особливих вимог. Після застосування виробу, рекомендується якнайскоріше підготувати його до подальшого використання.

Вказівки Робоче місце: Забруднення на поверхні видалити одноразовою або паперовою серветкою.

Зберігання і транспортування : Ніяких особливих вимог.

Підготовка очищення : Ніяких особливих вимог.

Очищення вручну: Дезинфекційним і/або чистячим засобом для очищення поверхонь. Врахуйте будь ласка вказану виробником концентрацію.

Очищення автоматично: Автоматичне очищення не допустиме.

Дезинфекція: Стрічка і застібка обробляються напр. за допомогою Хеліпур (Helipur, фірми "Б. Браун Мельцунген АГ", Германію). Врахуйте будь ласка вказану виробником концентрацію і час дезинфекційної витримки.

Обслуговування: Пошкоджені частини відсортувати, при необхідності замінити.

Контроль і експлуатаційна перевірка : Перед використання перевірте механізм замку.

Упаковка: Окремо. Можна використати стандартний поліетиленовий пакет. Розмір пакету повинен відповідати розміру виробу так, щоб пакет вільно закривався.

Стерилізація: Не відноситься до хірургічних інструментів, немає необхідності в стерилізації.

Зберігання: Ніяких особливих вимог.

Додаткова інформація: При зносі стрічки, можна замовити її як запасну частину.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу Ви знайдете на нашому сайті: www.kawemed.de.

Виробник: **KaWe**

Контакт з виробником: Адреса, номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.