

Посібник по застосуванню Дзеркало по Клару

Шановний клієнт, велике спасибі, що Ви віддали перевагу продукту фірми KaWe. Наші вироби відрізняються високою якістю і довгим терміном експлуатації. Цей виріб відповідає вимогам EG - 93/42/EWG (директива по медичних приладах).

Перед використанням прочитайте ретельно і повністю інструкцію з експлуатації і дотримуйтеся вказівок по догляду!

Перед застосуванням уважно ознайомтеся з правилами користування.

Застосування: Використати дзеркало по Клару дозволяється тільки спеціально навченому і допущеному персоналу.

Призначення: Дзеркало по Клару служить для освітлення поля дослідження при діагностиці.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашого посібника по застосуванню, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Запобіжні заходи: Дзеркало по Клару можливо використовуватися тільки у бездоганному стані.

Обережно: Не допускати падіння виробу : скло! Лампа розжарювання нагрівається в процесі користування. Не торкатися.

Технічні дані: Введення 100 - 240 В 400 мА 50 - 60 Гц 6 В/1,0 А макс.

Правила користування : Забруднення на поверхні дзеркала видалити не ворсистого тканиною. Дзеркало по Клару з'єднати з енергоджерелом. Встановити налобну стрічку. Дзеркало і лампу розжарювання встановити в потрібній позиції.

Чищення і дезинфекція : Усі частини можна протирати вологою серветкою.

Дезинфекція не рекомендується.

Запобіжні заходи! Дзеркало по Клару з джерелом живлення від мережі: Перед очисткою від'єднати мережевий штекер!

Обслуговування і ремонт : При належному застосуванні обслуговування обмежується до мінімуму.

Запобіжні заходи! Дзеркало по Клару з живленням від мережі: Передусім від'єднати мережевий кабель від штепсельної розетки і потім охолодити джерело світла мінімум 2 хвилини!

Контроль перед експлуатацією: Необхідно упевнитися в тому, що усі різьбові з'єднання щільно затягнуті.

Упаковка: Пакувальний картон з вкладенням з поролону.

Зберігання і транспорт : При транспортуванні використати удароміцну упаковку.

Дзеркало по Клару зберігати в сухому і чистому приміщенні, переважно в оригінальній упаковці.

Утилізація: Пристрій містить електронні складові елементи. Для відвертання загрози забруднення довкілля, утилізацію робити відповідно до діючих вимог ЄС. Утилізація продукту з побутовими відходами заборонена.

Контакт з виробником: Адреса, номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.