

Посібник по застосуванню Неврологічний і перкусійний молоточок

Шановний покупець, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю. Справжній виріб фірми KaWe відповідає визначенням директиви EG 93/42/EWG (директива по медичних приладах).

Перед використанням слід повністю і уважно прочитати цей посібник по застосуванню і дотримуватися вказівок по догляду!

Перед використанням уважно ознайомтеся із способом застосування.

Застосування: Користуватися перкусійним і неврологічним молоточком дозволяється тільки уповноваженому персоналу.

Призначення: Діагностичний інструмент для перкусії (лікарського вистукування). **Використання не за призначенням/протипоказання:** Інше використання або застосування, що виходить за рамки, вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають в наслідку цього наслідку виробник відповідальності не несе. За створення ризикованих ситуацій відповідає тільки користувач.

Експлуатація неврологічного і перкусійного молоточка: Неврологічним молоточком, вільно, не сковувавши зап'ястка, вистукують сухожилля, що викликає рефлекторне стискування (стягання) відповідного м'яза. За допомогою голки і кисті перевіряються різні рефлекси і чутливість поверхні шкіри.

Інші вказівки, догляд, зберігання : При відповідному використанні і зберіганні згідно з приписами, цей виріб надійно служитиме Вам багатьох років.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашого посібника по застосуванню, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі.

Обмеження повторної підготовки : Часта підготовка виробу до застосування має незначну дію на нього. Термін служби (тривалість експлуатації) виробу залежить зазвичай від зносу і ушкоджень. Після застосування приладу, рекомендується якнайскоріше підготувати його до подальшого використання.

Вказівки Зберігання і транспорт : Ніяких особливих вимог.

Підготовка очищення : Ніяких особливих вимог.

Ручне очищення: Протирайте неврологічний молоточок вологою серветкою або засобом для очищення поверхонь. Врахуйте, будь ласка, вказану виробником концентрацію.

Дезинфекція: Дотримуйтеся інструкції виробника відносно дозування дезинфікуючих і чистячих розчинів. При занадто слабкому дозуванні розчину дезинфекція безрезультатна, занадто сильне дозування викликає ушкодження інструменту. Зверніть увагу на тривалість дезинфекції! Розчин для дезинфекції і чищення необхідно регулярно оновлювати, інакше розчин втрачає свою дію.

Молоточки не підлягають стерилізації. Дезинфекція - це первинна обробка забрудненого предмета або матеріалу, її проводять з метою зменшення/знищення мікроорганізмів, що полегшує подальше очищення. Вимагається невідкладно проводити дезинфекцію, запобігаючи засиханню забруднень на матеріалі. Крім того, метою дезинфекції є захист можливого зараження під час обстеження як персоналу, так і довкілля. Цей процес повинен відбуватися відразу після застосування і по можливості на місці використання.

Стерилізація: Голка підлягає стерилізації.

Стерилізація: Успішна стерилізація голки гарантована при виконанні наступних параметрів : фракціонований передвакуум (3 цикли), температура стерилізації : мінімум 132 °C, максимум 137 °C, час витримки : мінімум 3 мін (повний цикл), час висушування : 10 хв.

Обслуговування: Пошкоджені частини відсортувати, при необхідності замінити. **Контроль і експлуатаційна перевірка :** Рухливі частини, такі як голка і кисть, перевірити на легкість ходу. Проводьте візуальний контроль на предмет ушкоджень і міру зносу. Перед застосуванням перевірте чи усі різьбові з'єднання затягнуті.

Упаковка: Окремо: можна використати стандартний поліетиленовий пакет. Пакет повинен відповідати розміру інструменту.

Зберігання: Ніяких особливих вимог.

Утилізація: Цей виріб можна утилізувати разом з побутовими відходами.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу Ви знайдете на нашому сайті: www.kawemed.de.

Виробник: **KaWe**

Контакт з виробником: Адреса або номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.



Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Аламед» Україна, 04080, вул. Межигірська 82а, оф 301 Тел. +(38 044) 361-87-50 E-mail: alamedkiev@i.ua