

Посібник по застосуванню: ліхтарик діагностичний Cliplight / ліхтарик діагностичний KaWe DIALIGHT® XL / ліхтарик діагностичний, білий

Шановні клієнти, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю. Справжній виріб фірми KaWe відповідає визначенням директиви EG 93/42/EWG (директива по медичним приладам).

Перед використанням слід повністю і уважно прочитати цей посібник по застосуванню і дотримуватися вказівок по догляду!

Перед використанням уважно ознайомтеся із способом управління.

Застосування: Використовувати ліхтарики діагностичні дозволяється тільки спеціально навченому і допущеному персоналу.

Призначення: Ліхтарики діагностичні є допоміжним засобом для освітлення місця обстеження наприклад порожнини рота, поверхні шкіри.

Експлуатація: Ліхтарик діагностичний Cliplight: Включення відбувається шляхом натиснення на кліпсу до контакту з металевим кільцем на штифті. Заміна лампи або батарей шляхом відгвинчування металевого утримувача ламп.

Ліхтарик діагностичний KaWe DIALIGHT® XL : Включення і виключення шляхом пересування повзункового перемикача Вкл/викл. Для заміни лампи або батарей (батарей не входять в об'єм постачання) відгвинтити голівку від рукоятки. Ліхтарик діагностичний, білий : Включення і виключення шляхом натиснення на чорний кнопковий вимикач. Для заміни лампи або батарей відгвинтити чорну частину кліпси.

Використання не за призначенням/протипоказання для виробу: Інше використання або застосування, що виходить за рамки призначення, вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають внаслідок цього ушкодження виробник відповідальності не несе. Забороняється застосування ліхтариків діагностичних для обстеження ока. За створення ризикованих ситуацій відповідає тільки користувач.

Застереження: Забороняється світити ліхтариками діагностичними безпосередньо в око. Не занурюйте ліхтарики в рідину. Не допускайте прямого контакту з язиком і слизовою оболонкою.

Гарантія: При правильному використанні і дотриманні нашого посібника (вказівок) по застосуванню, ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу (гарантія не поширюється на лампи розжарювання і акумулятори). При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Обмеження регенерації : Ніяких особливих вимог. Рекомендуємо регенерацію інструменту робити відразу після його застосування.

Вказівки Робоче місце: Забруднення на поверхні видалити за допомогою одноразової/паперової серветки.

Зберігання і транспорт : Зберігайте інструмент в упаковці, щоб уникнути забруднень і попадання пилу. Зверніть увагу, що при падінні, лампа може розбитися.

Підготовка до очищення: Ніяких особливих вимог.

Очищення вручну: Зовні інструмент можна очищати вологою, м'якою і не ворсистю тканиною. Дотримуватися концентрації чистячого засобу згідно припису заводу виробника.

Очищення автоматично: Автоматичне очищення не можливе.

Дезинфекція: Для дезинфекції ліхтариків серветку можна злегка змочити спиртом. Для дезинфекції застосовувати дезинфекційний засіб, призначений для медичних виробів з пластика. При використанні дезинфекційних засобів врахуйте концентрацію і час дезинфекційної витримки, вказані заводом виробником.

Обслуговування: Пошкоджені частини, наприклад, лампу або батареї відсортувати і відповідно замінити.

Контроль і перевірка функції : Перед застосуванням зробити візуальний контроль лампи.

Упаковка: Cliplight: у блістер-упаковці / KaWe DIALIGHT® XL : окремо в сумочці з тканини / фонарик діагностичний, білий: поліетиленовий пакет Розмір пакету повинен відповідати розмірам виробу, так щоб пакет вільно закривався.

Стерилізація: Не відноситься до хірургічних інструментів, в стерилізації немає необхідності.

Зберігання: При відповідному використанні і зберіганні згідно з приписами виріб надійно служитиме Вам багато років.

Додаткові відомості: Виріб підлягає утилізації в спеціальних пунктах по роздільній утилізації електричних і електронних приладів.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу Ви знайдете на нашому сайті: www.kawemed.de.

Виробник: **KaWe**

Контакт з виробником: Адреса або номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.